

NÁVOD K POUŽITÍ

Standardní ocelový invalidní vozík

ZDRAVOTNÍ POMŮCKA

Verze: 1 10/2022




REF BME4611

ÚVOD


Ruční invalidní vozík slouží jako dopravní prostředek pro handicapované osoby, pacienty a seniory.

KONSTRUKCE VOZÍKU

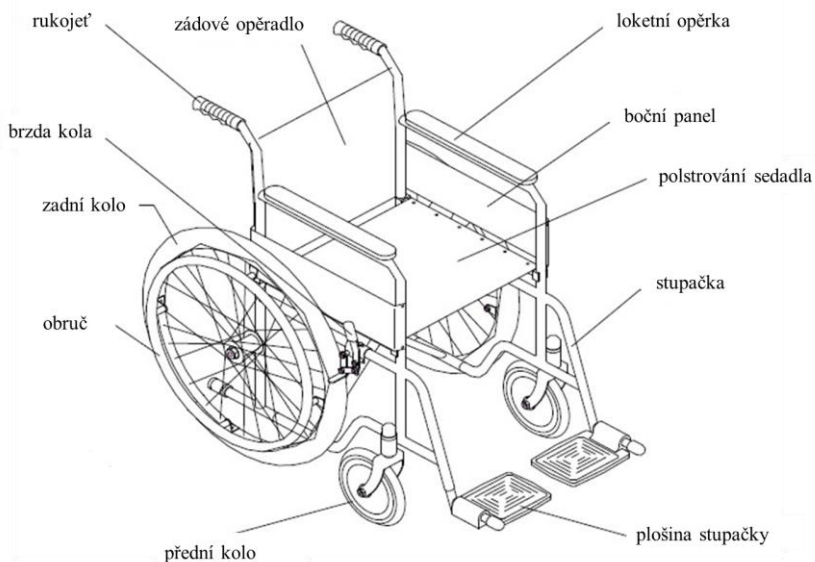


JAK ROZLOŽIT VOZÍK S PEVNÝM OPĚRADLEM

Potřebné příslušenství: návod na použití a s vozíkem dodávaný imbusový klíč

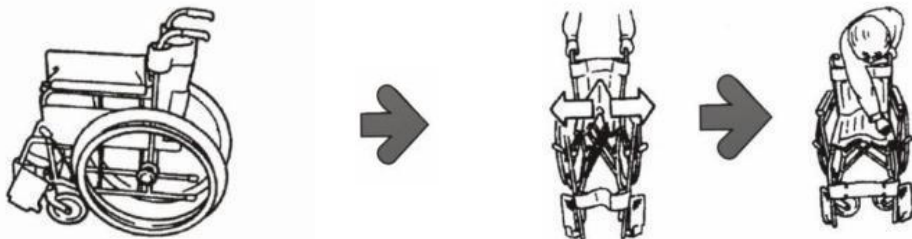


Krok 1: Postavte se za invalidní vozík a zatáhněte směrem do stran, abyste otevřeli sedadlo.

Krok 2: Poté zatlačením na sedadlo rozložte vozík.

 **POZOR!** Nepokládejte ruku ani prst na trubky sedadla nebo pod sedadlo.


NASTAVENÍ VÝŠKY STUPAČEK

METODA 1

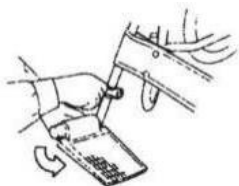



Otočte plošinu stupačky ve směru šipky a upravte její výšku. Poté utáhněte matici na vnější straně trubky pomocí přiloženého imbusového klíče.


METODA 2

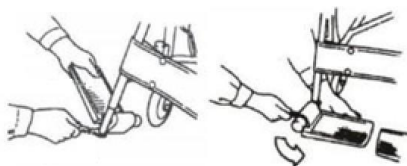

1. Pomocí imbusového klíče uvolněte část stupačky, kde je připevněna plošina stupačky.
2. Otočte plošinu stupačky ve směru šipky a utáhněte ji klíčem.

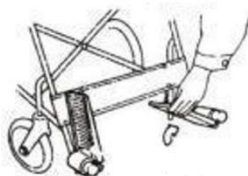


 **POZOR!** Při každém nastupování a vystupování z vozíku zvedněte plošinu stupačky nahoru!

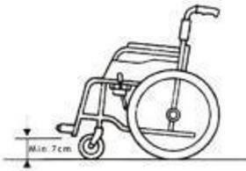

Pozor! Ujistěte se, že plošina podnožky je alespoň 7 cm nad zemí. Pokud je umístěna příliš nízko, může narážet při jízdě do překážek. Může to způsobit nerovnováhu vozíku!


SKLÁDÁNÍ VOZÍKU

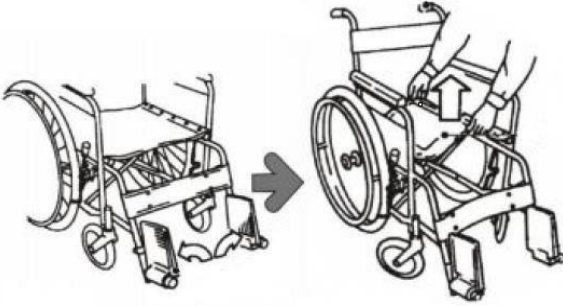

Krok 1: Zvedněte plošiny stupaček ve směru šipek.

Krok 2: Poté zatáhněte za sedadlo a složte vozík.

POUŽITÍ BRZDY

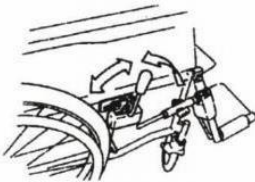


Zatáhněte za zajišťovací páčky brzdy na obou stranách vozíku dozadu, abyste invalidní vozík zabrzdili. Pro odbrzdění invalidního vozíku zatáhněte za zajišťovací páčky dopředu.



POZOR!

1. Nezapomeňte použít brzdu i při krátkém zastavení. Navykněte si brzdy používat.
2. Invalidní vozík nezastaví okamžitě, proto příliš nezrychlujte, když v něm sedíte.
3. Při zatáčení do ostré zatáčky snižte rychlost, abyste se nepřevrátili.
4. Před tlačení invalidního vozíku se ujistěte, že nohy pacienta jsou na stupačkách.
5. Bezpečnost je vždy na prvním místě. Pokud se sami necítíte bezpečně ovládat invalidní vozík, měli byste požádat o pomoc.


TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ VOZÍKU

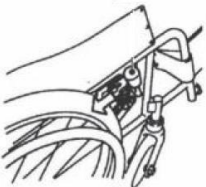

Při nastupování a vystupování z invalidního vozíku se ujistěte, že je zajištěna brzda zadních kol. Ujistěte se, že používáte brzdy správně.




Při sesedání z vozíku nestoupejte na stupačky, jinak se vozík překlápí dopředu.

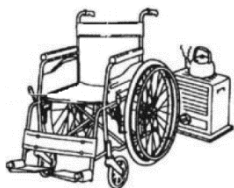

Neumisťujte invalidní vozík do blízkosti zdrojů ohně, jinak by mohlo dojít k požáru zádového opěradla a k zranění.



Chcete-li s invalidním vozíkem překonat vyvýšenou překážku, musí doprovod šlápnut na nášlapní trubku a zatlačit na madla směrem dolů, aby se přední kola zvedla na překážku, a poté zatáhněte za madla směrem nahoru, aby se zvedla zadní kola. Nesnažte se překonat překážku násilím.

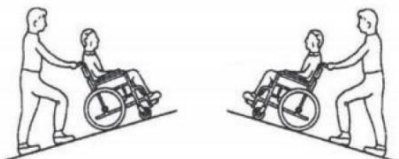

Chcete-li se pohybovat do kopce nebo z kopce, ujistěte se, že doprovodující osoba, která tlačí vozík, je v bezprostřední blízkosti; jinak se vozík může převrátit. V případě prudkého svahu by měl být invalidní vozík otočen tak, aby pacient směřoval nahoru. Doprovádějící osoba, která ovládá invalidní vozík, by měla pomalu couvat.



Při zvedání invalidního vozíku s pacientem se nedržte za rukojeti. V opačném případě může dojít k poškození vozíku.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICKÉ PARAMETRY		
Katalogové číslo / název		Standardní ocelový invalidní vozík
Šířka sedadla [mm]		450
Celková šířka [mm]		620
Celková délka [mm]		1020
Celková výška [mm]		860
Hloubka sedadla [mm]		420
Výška opěradla [mm]		420
Nastavení výšky loketní opěrky (mm)		290
Výška sedáku od země [mm]		460
Maximální bezpečné zatížení [kg]		110 kg
Hmotnost základního vozíku [kg]		17 kg
Statická stabilita [°]	z kopce	9°
	do kopce	9°
	příčně	9°
Průměr kola [mm]	přední	200
	zadní	600
Teplota použití a skladování		od -15° C do 40° C

SEZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

Rukojeti pro tlačení	butylkaučuk
Zadní kolo	PU (polyuretan) nebo butylkaučuk
Struny	ocel
Brzda kola	ocel
Křížová konstrukce	ocel
Rám	ocel
Vídlice	ocel
8" Přední kolo	PVC (polyvinylchlorid) + ABS (akrylonitril-butadien-styrenový terpolymer)
Stupačky	ABS (akrylonitril-butadien-styrenový terpolymer)
Pásek pro zajištění chodidla	polyester
Stupačka	ocel
Čalounění sedadel	polyester + polyuretanová pěna
Čalounění opěradla	polyester + polyuretanová pěna
Opěradlo	PVC (polyvinylchlorid) + polyuretanová pěna

DOVOZCE

Reha Fund Sp. z o. o. ul.
Staniewicka 14
03-310 Varšava, Polsko
tel. 48 22 59 40 300 fax. 48 22 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl




Shanghai Brother Medical Products Manufacturer Co., Ltd

Address: 718 Fanou Modern Building, No 2449 Gonghexin Road, Jingan District, Shanghai City, Čína,

Tel. 0086-21-51876643

Email: brothermedical2@hotmail.com

www.brothermedical.com

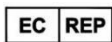

SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

email: ec.rep@sungogroup.com



POZNÁMKY

ZÁRUČNÍ LIST

Standardní ocelový invalidní vozík

Model:	Sériové číslo:	Datum prodeje:	Podpis a razítko prodejce:

PODMÍNKY ZÁRUKY

- Výrobce ubezpečuje zákazníka, že předaný předmět prodeje, na který je vystavený tento záruční list, je úplně nový a kvalitní.
- Na rám vozíku se vztahuje záruční doba 60 měsíců, na ostatní díly se vztahuje záruční doba 36 měsíců od data prodeje v záručním listě.
- Podkladem pro posouzení záruční reklamace je doručení správně vyplněného záručního listu s příloženým dokladem o zakoupení.
- Případné závady na zařízení budou odstraněné společností REHA FUND Sp. z o.o. nebo autorizovanými servisními techniky za předpokladu, že zařízení bolo používané v souladu s jeho určením a doporučeními v návodě na použití.
- Oprava bude vykonaná v co nejkratším možném čase, nejpozději do 14 dnů, ode dne přijetí zařízení v servisním středisku.
- Záruka se nevztahuje na
 - úkony údržby, čištění a nastavování popsané v návodě na použití;
 - díly podléhající opotřebování během běžného používání;
 - mechanické a tepelné poškození, např. ohnutí, poškrábání, zlomení atd.;
 - poškození způsobené používáním zařízení v rozporu s návodem na použití, nedbalostí, vykonáváním samostatných oprav, úprav nebo konstrukčních změn.
- Před odevzdáním zařízení do autorizovaného servisního střediska je potřeba zařízení vyčistit v souladu s návodem na použití, aby bolo vhodné na servis.
- Opravy a výměnu náhradních dílů by měli vykonávat autorizovaní servisní technici společnosti Reha Fund s.r.o.
- V případě neopodstatněné reklamace budou zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
- Územní rozsah záruční ochrany se vztahuje na území České republiky.
- Záruka na předaný tovar nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývající z nesouladu tovaru se smlouvou.

SEZNAM SERVISNÍCH OPRAV (vyplní servis)

Č.	Datum podání žádosti	Objednávka č.	Popis závady/rozsah opravy	Datum vykonání opravy	Razítko a podpis servisu
1.					
2.					