

NÁVOD K POUŽITÍ
TOALETNÍ KŘESLO (MARCO 802)
zdravotnická pomůcka

Katalogové číslo:	RF-802
Celková šířka:	55 cm
Šířka sedáku:	46 cm
Hloubka sedu:	40 cm
Průměr kol:	13 cm
Výška sedu:	50,5 cm
Celková délka:	85 cm
Nastavení výšky:	95,5-98 cm
Nastavení výšky opěradla:	45,5-48 cm
Max. bezpečná zátěž:	120 kg
Hmotnost:	13,5 kg



 **POZOR!** Před použitím toaletního křesla si pozorně přečtěte níže uvedené pokyny.

ÚVOD

Toaletní křeslo funguje jako přenosná toaleta. Zajišťuje osobní hygienu. Křeslo lze použít u lůžka pacienta nebo v koupelně. Lze jej také použít k přepravě uživatele za pomoci asistenta.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Pro vaši bezpečnost dodržujte následující doporučení:

1. Před použitím toaletního křesla se ujistěte, že jsou kolečka v dobrém stavu a že křeslo je stabilní.
2. Používejte pouze originální příslušenství. Použití neoriginálních dílů může vést k nesprávnému přizpůsobení toaletního křesla, což má za následek riziko pádu.
3. Nepřekračujte maximální povolené zatížení toaletního křesla.
4. Neskladujte toaletní křeslo při teplotách pod 0°C.
5. Jakýkoli vážný incident související s prostředkem musí být oznámen výrobcem a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště.


 **POZOR!** Nedodržení výše uvedených bezpečnostních pravidel může vést k vážným nehodám.

POSAZENÍ A VSTAVÁNÍ

1. Ujistěte se, že je křeslo stabilní a připravené k použití.
2. Postavte se zády ke křeslu tak, aby se vaše podkolenní dotýkalo přední části křesla.
3. Natáhněte ruce za sebe a položte je na loketní opěrky.
4. Pomalu se posaďte na křeslo, pokrčte lokty a pokud možno i kolena a kyčle.
5. Abyste z vozíku vstali, položte ruce na loketní opěrky a odtlačte se nahoru. Než pustíte opěrky křesla, ujistěte se, že udržujete rovnováhu.












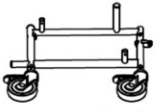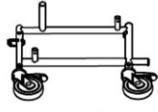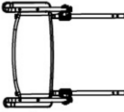


ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Doporučuje se pravidelně kontrolovat toaletní křeslo, zda nevykazuje známky poškození nebo viditelné známky opotřebení. Pravidelně kontrolujte, zda:
 - na rámu nejsou žádné praskliny nebo deformace,
 - kola nejsou poškozená – pokud ano, měla by být vyměněna,
 - žádné další části toaletního křesla nejsou uvolněné nebo poškozené.
2. Toaletní křeslo se doporučuje pravidelně čistit měkkým hadříkem a mýdlovou vodou. Po vyčištění je třeba toaletní křeslo osušit měkkým hadříkem. WC nádobu lze dezinfikovat za studena, např. etanolem.


 **POZOR!** K čištění toaletního křesla nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abraziva.

ZPŮSOB INSTALACE

obr. 1

①	Levý rám	1 ks	②	Pravý rám	1 ks	③	Opěradlo	1 ks			
											
④	Levá stupačka	1 ks	⑤	Pravá stupačka	1 ks	⑥	Sedadlo	1 ks			
								⑦	Poklop	1 ks	
		1 ks	⑧		Spony	4 ks	⑩		Šrouby	2 ks	
								⑪		Spojovací trubky	2 ks
											



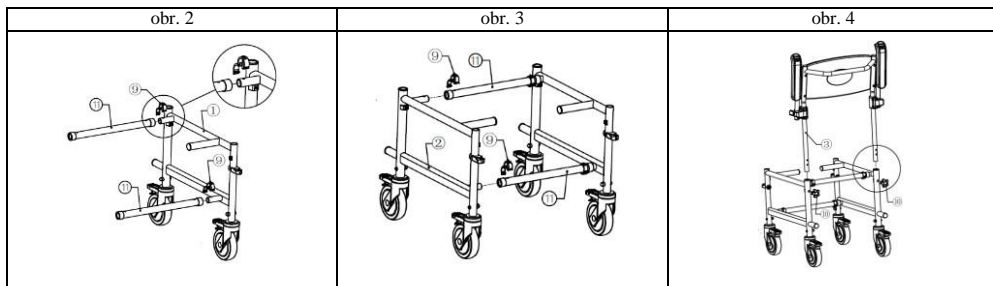







1. Výrobek je určen pro svépomocnou montáž bez použití nářadí.
2. Před montáží zkontrolujte seznam dílů (obr.1).
3. Vložte díl 11 do dílu 1, jak je znázorněno na obrázku 2. Současně zarovnejte boční otvory v obou dílech.
4. Vložte díl 9 do otvoru a upevněte bezpečnostní zámek, jak je znázorněno na obrázku 3.
5. Vložte díl 2 do dílu 11, jak je znázorněno na obrázku 3. Zarovnejte boční otvory v obou dílech současně.
6. Vložte díl 9 do otvoru a upevněte bezpečnostní zámek, jak je znázorněno na obrázku 3.
7. Vložte díl 3 do trysek, jak je znázorněno na obrázku 3. Současně zarovnejte boční otvory.
8. Zašroubujte díly 10, nastavte výšku opěradla na příslušnou úroveň.



SEZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

rám	aluminium
opěradlo	PU (polyuretan)
lokenní opěrka	PU (polyuretan)
sedadlo	PU (polyuretan)
stupačka	PA (polyamid)
kolo	PP (polypropylen) + TPR (termoplastická pryž)

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

	Výrobce
	Označení CE
	Referenční číslo
	Datum výroby
	Přečtěte si návod k použití
	Upozornění
	Sériové číslo
	Vrchní část, nepřevracet
	Skladujte na suchém místě
	Křehké, zacházet opatrně



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Varšava, Polsko
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Verze. 1.3
Vydáno: 04/2022

POZNÁMKY

ZÁRUČNÍ LIST
TOALETNÍ KŘESLO (MARCO 802)

Model:	Sériové číslo:	Datum prodeje:	Podpis a razítko prodejce:

PODMÍNKY ZÁRUKY

1. Výrobce ubezpečuje zákazníka, že předaný předmět prodeje, na který je vystavený tento záruční list, je úplně nový a kvalitní.
2. Na toaletní křeslo se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje v záručním listě.
3. Podkladem pro posouzení záruční reklamace je doručení správně vyplněného záručního listu s příloženým dokladem o zakoupení.
4. Případné závady na zařízení budou odstraněny společností REHA FUND Sp. z o.o. nebo autorizovanými servisními technikami za předpokladu, že zařízení bylo používáno v souladu s jeho určením a doporučeními v návodě na použití.
5. Oprava bude vykonána v co nejkratším možném čase, nejpozději do 14 dnů, ode dne přijetí zařízení v servisním středisku.
6. Záruka se nevztahuje na
 - úkony údržby, čištění a nastavování popsané v návodě na použití;
 - díly podléhající opotřebenosti během běžného používání;
 - mechanické a tepelné poškození, např. ohnutí, poškrábání, zlomení atd.;
 - poškození způsobené používáním zařízení v rozporu s návodem na použití, nedbalostí, vykonáváním samostatných oprav, úprav nebo konstrukčních změn.
7. Před odevzdáním zařízení do autorizovaného servisního střediska je potřeba zařízení vyčistit v souladu s návodem na použití, aby bylo vhodné na servis.
8. Opravy a výměnu náhradních dílů by měli vykonávat autorizovaní servisní technici společnosti Reha Fund s.r.o.
9. V případě neopodstatněné reklamace budou zákaznickovi účtovány náklady na dopravu.
10. Územní rozsah záruční ochrany se vztahuje na území České republiky.
11. Záruka na předaný tovar nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývající z nesouladu tovaru se smlouvou.

SEZNAM SERVISNÍCH OPRAV (*vyplní servis*)

Č.	Datum podání žádosti	Objednávka č.	Popis závady/rozsah opravy	Datum vykonání opravy	Razítko a podpis servisu
1.					
2.					