

Párování ručního ovladače Bluetooth

Před nastavením funkcí lůžka musí být ruční ovladač spojen (spárován) s řídicí jednotkou.
Postupujte následovně:

1. Zapojte napájecí zdroj do elektrické zásuvky.
 - Pokud je zdroj již v zásuvce, vyjměte napájecí zdroj ze zásuvky, počkejte cca. 10 sec a znovu jej zapojte.
2. Do 20 sec stiskněte současně dvě tlačítka nahoru / dolů pro výšku základny matrace po dobu alespoň 5 sekund

Pokud je připojení úspěšné, LED dioda na řídicí jednotce se rozsvítí oranžově.

Pokud připojení nebylo úspěšné, LED dioda na řídicí jednotce blikne 4krát oranžově. V takovém případě opakujte kroky 1 a 2.



Blokace (imobilizace) funkcí polohování:




1. Přidržete dodaný magnet [a] u magnetického senzoru integrovaného v ručním spínači (viz obrázek).
2. Poté zamkněte / odemkněte požadovanou funkci.
 - Uzamčení se provádí stisknutím pravého tlačítka na ručním ovladači.
 - Odemknutí se provádí stisknutím levého tlačítka (viz následující tabulka).


i Postup s magnetem (krok 1) musíte opakovat pro každou další funkci, kterou chcete uzamknout. Nelze současně uzamknout více než jednu funkci.

Odemknout	Funkce	Zamknout
	Opěrka zad	
	Výška základny matrace	
	Stehenní opěrka	
	Pozice v režimu spánku / reverzní Trendelenburgova poloha	

Výměna baterie a reset:

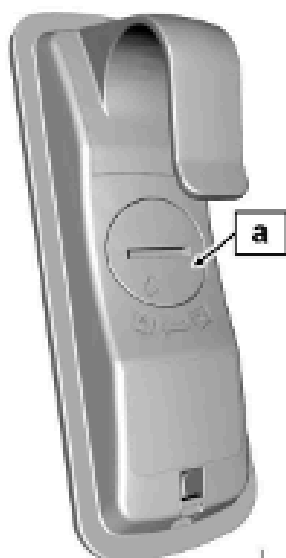

- Otevřete kryt prostoru pro baterie [a] na zadní straně ručního ovladače.
 - Například vložte minci do štěrbinu krytu a otočte ji proti směru hodinových ručiček.
- Vyměňte starou baterii.
- Vložte novou baterii (dodržujte polaritu).
- Uzavřete přihrádku na baterie krytem (otočte ve směru hodinových ručiček).
- Chcete-li ruční ovladač Bluetooth resetovat, postupujte podle těchto pokynů:
 - Stiskněte a podržte současně tlačítka A, B a C (viz obr.) po dobu nejméně 4 sekund.

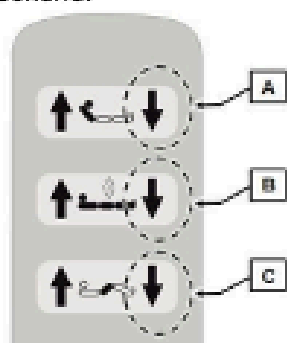

⇒ Ruční ovladač je nyní resetován.

Po RESETU je nutné pro připojení postele opět provést párování ovladače s řídicí jednotkou.